

Jump3

Oprogramowanie do zewnętrznej autoryzacji wyników badań w immunologii transfuzjologicznej

DiaHem Diagnostic Products przedstawia innowacyjny system Jump3 do zewnętrznej autoryzacji wyników badań w immunologii transfuzjologicznej. Oprogramowanie wykorzystuje bezpieczne łącze internetowe VPN oraz cyfrowy podpis elektroniczny. Jump3 ma intuicyjne i łatwe menu, co w połączeniu z szeroką ofertą urządzeń i odczynników DiaMed *ID-Micro Typing System* oraz oprogramowaniem Maestro stanowi elastyczne i bezpieczne rozwiązanie dla każdego laboratorium.

Jump3 umożliwia łatwą zewnętrzną autoryzację wyników badań. Jest interaktywnym oprogramowaniem opartym na technologii web współpracującym z urządzeniami firmy DiaMed, wykorzystuje podpis cyfrowy.

Kluczowe zalety

- Zewnętrzna autoryzacja wyników badań
- Podpis cyfrowy
- Proste, intuicyjne oprogramowanie
- Komunikacja z zastosowaniem technologii internetowej
- Bezpośredni bezpieczny dostęp do bazy danych bez transmisji plików
- Wyniki badań wraz z obrazami reakcji dostępne w archiwum
- Pełna integracja z oprogramowaniem DiaMed Maestro
- Interfejs z wszystkimi analizatorami DiaMed
- Zabezpieczenie indywidualnym hasłem
- Możliwość dostosowania raportów do potrzeb użytkownika
- Opcja podłączenia do istniejących systemów HIS lub LIS



Jump3

Bezpieczna, szybka i prosta procedura w kilku krokach:

Jump3

Oprogramowanie do zewnętrznej autoryzacji wyników badań w immunologii transfuzjologicznej

1. Odczyt wyników badań za pomocą urządzenia DiaMed oraz oprogramowania Maestro



2a. Logowanie Technika – zlecenie autoryzacji dla Diagnosty

2b. Logowanie Diagnosty – autoryzacja wyników

Jump3

Security Login Procedure

Użytkownik:

Password:

Zaloguj

Kod: 1200978712
 Data badania: 03/03/2010
 Pacjent: Johnny Walker
 Kod karty: 5053124140605422459
 Nazwa karty: ID-Clon ABO/D+ reverse group
 Wynik: OK Nie ważne Ukryj karte
 Zamknij

Obrazy

A	B	D
-	-	-

3. Zatwierdzanie wyniku – podpis elektroniczny



Prosty

Interaktywne oprogramowanie prowadzi operatora krok po kroku przez procedurę walidacji wyniku.

Szybki

- Oparty na technologii web
- Bez transmisji plików
- Bezpośredni dostęp do bazy danych zawierającej wyniki badań
- Autoryzacja wyników dla zdefiniowanej liczby użytkowników

Bezpieczny

- Zintegrowany z oprogramowaniem *Maestro*
- Pozytywna identyfikacja próbek poprzez kody kreskowe
- Oprogramowanie zabezpieczone indywidualnym hasłem dla każdego użytkownika
- Baza danych z wynikami badań i obrazami reakcji
- Archiwum wszystkich zatwierdzonych badań

Elastyczny

- Interfejs z wszystkim urządzeniami DiaMed
- Personalizacja raportów
- Komunikacja z LIS lub HIS

Wymagania

- Łącze internetowe
- Przegłdarka internetowa
- Analizator DiaMed:
 - Czytnik: Banjo, Saxo
 - Automat: Techno, Classic
- Oprogramowanie DiaMed *Maestro*
- Karta z kwalifikowanym podpisem cyfrowym: zapytaj o szczegóły

DiaHem
Diagnostic Products
Switzerland

Partner for software solutions and complete systems for blood banks and transfusion laboratories

DiaHem AG, Head Office Switzerland
Schlosserstrasse 4, CH - 8180 Bülach
T +41 43 411 41 00, F +41 43 411 52 22
infoch@diahem.com, www.diahem.com

e-Delphyn
Transfusion Software

EQC-Software
External Quality Control

DiaHem SP. Z.O.O., Office Poland
Al. Słowackiego 64, PL - 30-004 Kraków
T +48 12 416 36 82, F +48 12 416 36 92
infopl@diahem.com, www.diahem.pl

DiaMed Maestro
Instrument interfaces

DiaHem-Gramim D.O.O., Serbia/Montenegro
DiaHem D.O.O., Croatia
DiaHem OOD, Bulgaria
infoch@diahem.com, www.diahem.com

Jump3
Remote blood validation

3S Tracing Software
Long term storage system